

計画停電実施に伴う弊社デジタル機器の取り扱いについて

東京電力 及び 東北電力 管轄におきまして『輪番停電』が実施されております。

機器使用中に停電となりますと復帰できない重大な故障になる場合がございます。

つきましては、下記 手順に従い作業の実施をお願いいたします。


★ご注意ください★

～ 停電前の作業 ～

- ①停電の前に各PC及びサーバーPCの電源をオフにしてください。
パソコンの電源オフ(シャットダウン)には時間がかかりますので停電開始時間前に余裕を持ってお願いいたします
- ②、①の後、下記【APC】と記載された機器の ① ボタンを長押しして電源をオフして下さい。(予備バッテリー)

～ 停電後の作業 ～

- ③初めに下記【APC】と記載された機器の ① ボタンを長押しして電源を入れ、その後、サーバーPC、各PCの電源をオンして下さい。

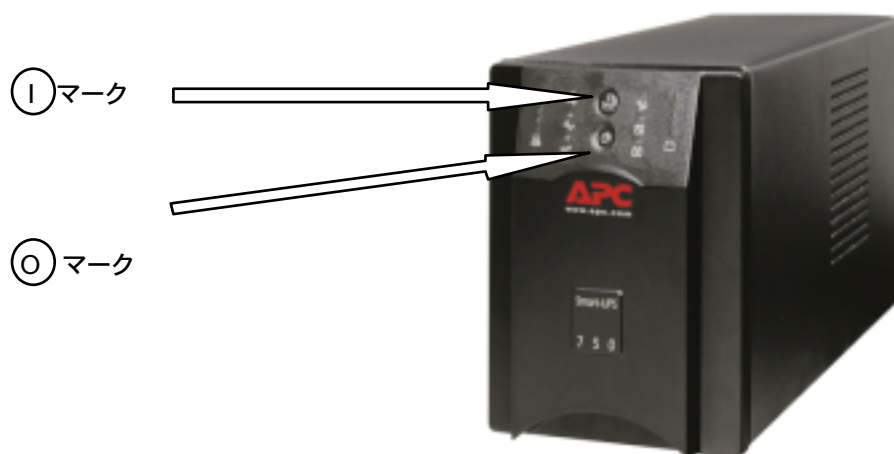

※ご導入 時期により製品が白い場合があります。ご注意ください。

又、お問合せに付きましては弊社支店営業所、サービスセンター又は弊社ホームページ

『<http://www.gcdental.co.jp/main.html>』よりお問い合わせください。