

計画停電実施及び断水に伴う弊社ユニット機器の取り扱いについて

東京電力 及び 東北電力 管轄におきまして『輪番停電』が実施されております。

機器使用中に停電となりますと復帰できない重大な故障になる場合がございます。

停電前

停電開始前にユニットのメインスイッチを必ずオフにしてください。

ユニット使用中に停電になった場合もメインスイッチをオフにしてください。

停電後

通常通りメインスイッチをオンにしてメインランプの点灯を確認して使用してください。

さらに停電だけでなく断水されている場合には断水復帰時に水詰まりを防ぐ為の注意のご案内をさせていただきます。

★ご注意下さい★

断水解消し水圧が復活した場合、水道管の内圧変化により赤錆等の濁り水が出る事が有り、ユニットの水回路が詰まる可能性があります。

つきましては、出口の大きい一般蛇口(消毒コーナー等)からの排水を3分程度行った上で、各ユニットのメインスイッチをONにして下さい。

その後、ユニットのスピットン洗浄スイッチをONにしてしばらく水を流して頂きますと水詰まりや、濁り水を防ぎ易くなります。

上記により、ハンドピースからの水詰まり。うがい用給水コップへの濁り水を減らす事が出来ます。

※水の汚れ具合により、流水時間は変更してください。

見た目では分りにくいので、コップ等へ給水されますと汚れ具合をご確認頂き易くなります。



の前に

