

ジーシー スクリューインプラント ReX

# ボールアバットメントIN ボールアバットメント

 internal implant  
**GENESiO Plus**  
ジェネシオ Plus

 external implant  
**SETiO Plus**  
セティオ Plus



## II ご使用の前に

### 1. ボールアバットメントおよび関連製品の種類

●ボールアバットメントIN  ジェネシオ/ ジェネシオPlus用 ●滅菌済み 【材質】チタン合金(Ti-6Al-4V)

対応 インプラント	カラー部高さ(mm)						
	0.5	1	2	3	4	5.5※	7※
φ 3.8							
φ 4.4							
φ 5							

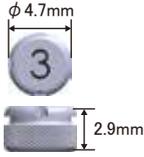
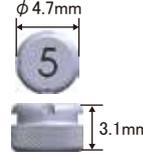
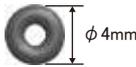
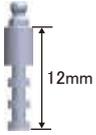
※受注生産

●ボールアバットメント  セティオ/セティオPlus用 ●滅菌済み 【材質】チタン合金(Ti-6Al-4V)

対応 インプラント	カラー部高さ(mm)					
	1.3	2	3	4	5.5※	7※
φ 3.8						
φ 4.4						
φ 5						

※受注生産

<補綴用品、技工用品> ●未滅菌

<p>●メタルハウジング3 (OリングN付)</p>  <p>【材質】チタン合金(Ti-6Al-4V)</p>	<p>●メタルハウジング5 (OリングN付)</p>  <p>【材質】チタン合金(Ti-6Al-4V)</p>	<p>●OリングN ※交換用</p>  <p>【材質】ニトリルゴム</p>	<p>●ボールアバットメント アナログ</p>  <p>【材質】ステンレス鋼</p>
--	--	---	---

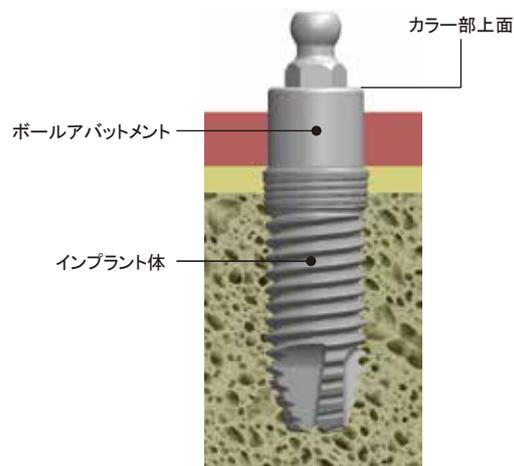
※メタルハウジングはOリングNが装填されています。

## 2. ボールアバットメントおよびメタルハウジングの選択

※イラストではジェネシオPlusを使用しています

### ■ボールアバットメントの選択

ボールアバットメントは歯肉の厚みに応じてカラー部高さを選択します。ボールアバットメントのカラー部上面が歯肉縁上となる高さを目安としてください。



### ■メタルハウジングの選択

・メタルハウジングは咬合力を負荷した際の沈下量が異なる2種類があります。メタルハウジング3は0.3mm、メタルハウジング5は0.5mmの沈下を許容するように設計されていますので、義歯の沈下程度に応じて選択してください。

・維持力はメタルハウジング3、5ともに約600gfです。

	沈下量	維持力
メタルハウジング3	0.3mm	600gf
メタルハウジング5	0.5mm	

