

ジーシー インプラント チタンベース



1. 幅広い補綴様式に対応
2. ポスト部の高さが調節可能




チタンベース一覧


システム	製品名	製品 No.	形状	識別	価格
SETiO	チタンベース φ3	7B317			単品 ¥ 10,300 (スクリュー付) 単独歯用 ジーシー加工センター サービス料
	チタンベース φ3.8	7B318			
	チタンベース φ4.4	7B319			
	チタンベース φ5	7B320			
GENESiO	チタンベース IN φ3.4	7B321			<データ送り> ¥19,300 (スクリュー付) <模型送り> ¥ 22,300 (スクリュー付) 〔チタンベース単品※ ¥10,300〕 加工サービス料 ¥12,000
	チタンベース IN φ3.8	7B322			
	チタンベース IN φ4.4	7B323			
	チタンベース IN φ5	7B324			
AadvA	チタンベース Narrow	7B325			※模型送りの場合にはチタンベースの 事前購入が必要となります。裏面の「模 型送り」ワークフローをご参照ください。
	チタンベース Regular/Wide	7B326			

アバットメント製作ワークフロー

データ送り

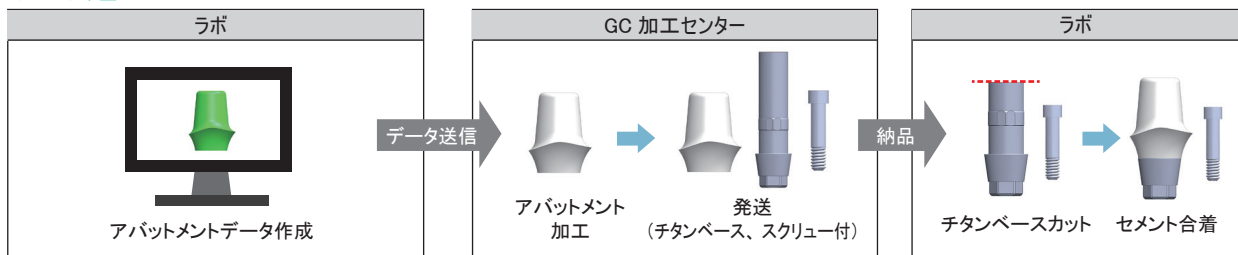

模型送り ※模型送りの場合にはチタンベースの事前購入が必要となります。

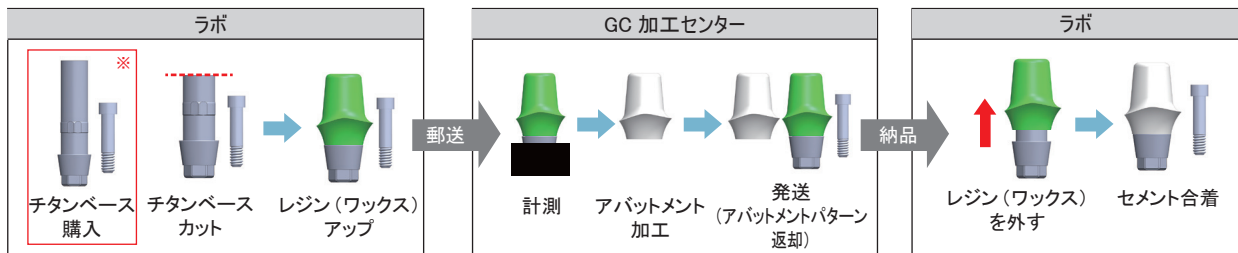


模型送りの際は下記 QR コードより注文書をダウンロードし、ご記入の上パターン郵送時に同封してください。




上部構造体の調整及び接着ステップ


1 上部構造体の適合確認、調整

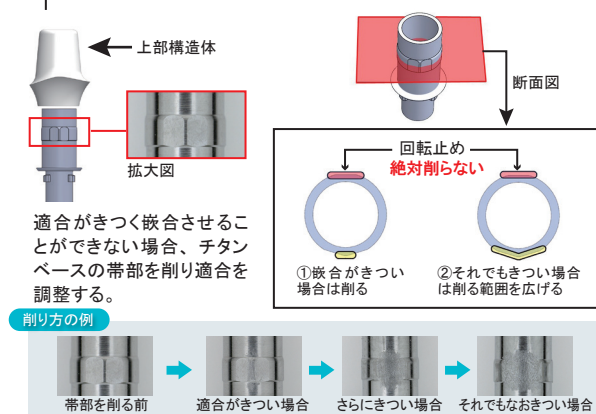


2 上部構造体の形態確認

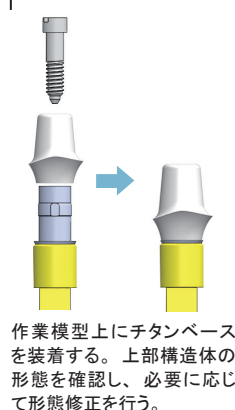


3 チタンベースのサンドブラスト処理

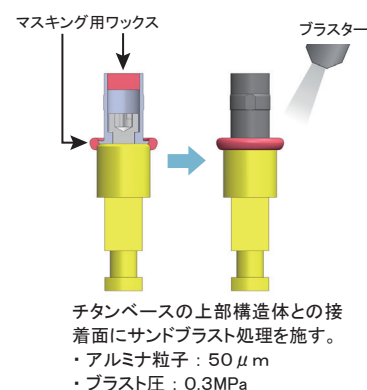


4 上部構造体の接着

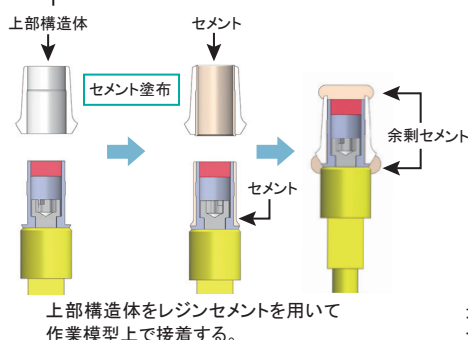


5-① 余剰セメントの除去 (光照射の場合)

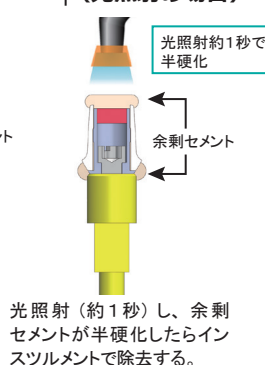

5-② 余剰セメントの除去 (化学効果の場合)

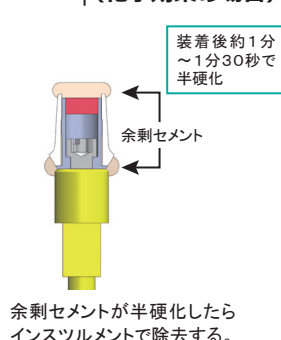


6 セメントの最終硬化

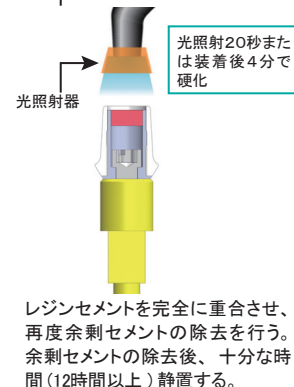

関連製品

歯科接着用レジンセメント
ジーシー
ジーセム リンクエース

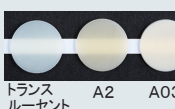

●色調
3色=A2、A03、トランスルーセント
●梱包・希望医院価格
1 函: シリンジ 4.6g (2.7mL) 2 本、
EM ミキシングチップ T 15 個、
EM ミキシングチップ F 5 個、
EM ミキシングチップ F 用ノズル
RC 5 個 = ¥9,600

Aadva Scan E1
Aadva Scan E3
Aadva Scan D2000



Aadva Zirconia
ディスク



(種類) 6種=ST14、ST18、
ST25、EI 14、EI 18、EI 25
ST: スタンダード
EI: エナメルインテンシブ
※数字はディスク厚さ
ディスク径: 98.5mm 全種共通
(包装) 1 函 1 枚入 =
ST14、EI 14... ¥37,500
ST18、EI 18... ¥39,500
ST25、EI 25... ¥41,500

ジーシー スクリュー インプラント Re チタンベース EX 高度管理医療機器 22900BZX00146000 ジーシー スクリュー インプラント Re チタンベース IN 高度管理医療機器 22900BZX00145000
ジーシー インプラント Aadva チタンベース 高度管理医療機器 22900BZX00132000 Aadva Zirconiaディスク 管理医療機器 225AFBZX00051000 ジーシー ジーセムリンクエース 管理医療機器 225AKBZX00043000
Aadva スキャン E1 一般医療機器 13B1X00155000293 Aadva スキャン E3 一般医療機器 13B1X00155000294 Aadva スキャン D2000 一般医療機器 13B1X00155000282
製造販売元・製造元: 株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼町76-1 製造販売元・製造元: 株式会社ジーシー デンタルプロダクツ 愛知県春日井市井市鳥居松町2-285