

メラフォルロール

滅菌バッグ




感染予防製品を専門に手掛ける
メラグ社製滅菌バッグ「メラフォルロール」
ニーズに合わせてお選びいただけます。

シーラー「メラシール 100+」と併用することで、プレポスト
パキューム方式の高圧蒸気滅菌器の真空状態にもしっかり
対応します。

MELAG
competence in hygiene

包装・希望医院価格●各1個
長さ(共通):200m
幅:5cm、7.5cm、10cm、15cm、20cm、25cm

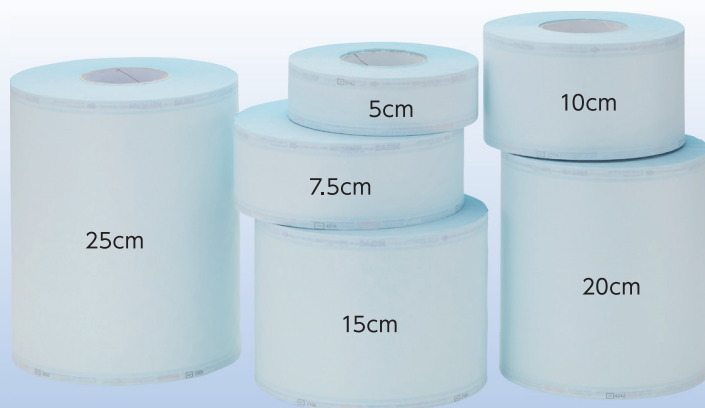

国際規格・欧州規格に対応

包装医療用包材の要求性能に関する国際規格「ISO 11607-1」、欧州規格「EN 868-5」に準拠。世界基準の設計・品質を提供します。



メラフォルロールに規格を明記

使用時に剥がしやすい“ピール性”

滅菌バッグはしっかり密閉する“シール性”と共に、器材を取り出す際の剥がしやすさ“ピール性”が求められます。メラフォルロールには、剥がす方向を示す矢印が印刷されています。優れた“シール性”と使いやすい“ピール性”が両立しています。



メラフォルロールに矢印を明記

滅菌対応を確認できるインジケータ

メラフォルロール印字部分に蒸気に反応して変色するインジケータを採用。滅菌されたものか否かを視覚的に識別が可能です。



メラフォルロールにインジケータを採用

器材ごとに選べるサイズ

滅菌バッグの大きさは、内部表面積の7割が目安です。器材の大きさに合わせて選択いただけます。

各メラフォルロールの幅に合わせた器材例


幅7.5cm



幅25cm



幅7.5cmのメラフォルロールは、タービンなどのインスツルメント包装に対応し、また「メラクイック12+」の滅菌バッグホルダのスリット部にセットしやすくおすすめです。

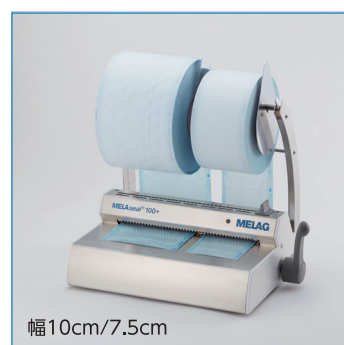

メラシール100+スタンドタイプへの設置例

関連製品

Vacuklav 31 B+

高圧蒸気滅菌器
パキューレブ®31B+

クラス
B



管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AKBZX00237000

Euroklav 29 VS+

高圧蒸気滅菌器
ユーロクレブ®29VS+

クラス
S



管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AKBZX00238000

MELAquick 12+

高圧蒸気滅菌器
メラクイック12+

クラス
S



管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AKBZX00142000


メラシール 100+

シーラー

メラシール 100+シリーズに 「スタンドDXタイプ」をラインアップ

シール作業時に、本体両サイドにあるホイールを回すことでメラフォルロールを必要な長さだけ簡便に引き出すことができます。異なるサイズの滅菌物を包装する際など、より作業効率が良くなります。

MELAG
competence in hygiene

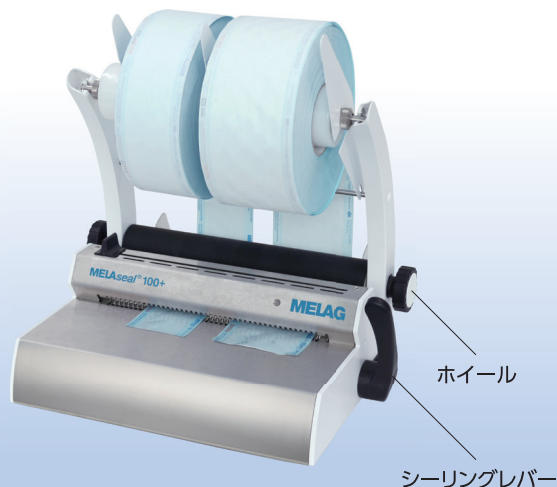


※「メラシール 100+」のスタンドタイプ/フラットタイプをご使用の場合、ロールディスベンサー部のみ交換いただくことで、スタンドDXタイプへの変更が可能です。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせください。

シーリングシーム幅10mmをもつシーラー。滅菌器内の急激な圧力変化による破裂を防止。

- 短いプリヒート機能により短時間で使用可能
- 省スペースで設置可能
- シーリング時間や温度をモニタリングし、ビープ音と共にLEDインジケータでお知らせ。適切なシーリングの実現が可能
- 設置環境に合わせて左右どちらにもシーリングレバーを装着可能
- 10mmのシーム幅があり、欧州規格にも適合

フラットタイプ

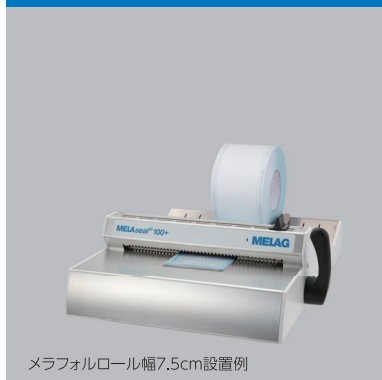

メラフォルロール幅7.5cm設置例

包装●1個
本体寸法:幅415×奥行460×高さ150mm
電源:AC100V
重量(本体のみ):5.4kg
シーリングシーム幅:10mm

スタンドタイプ



メラフォルロール幅20cm設置例

包装●1個
本体寸法:幅415×奥行280×高さ420mm
電源:AC100V
重量(本体のみ):5.4kg
シーリングシーム幅:10mm

スタンドDXタイプ



メラフォルロール幅5/7.5cm設置例

包装●1個
本体寸法:幅415×奥行330×高さ430mm
電源:AC100V
重量(本体のみ):5.4kg
シーリングシーム幅:10mm

※シール可能な滅菌バッグの幅は、最大250mmまでです。※メラフォルロールは包装に含まれておりません。
※「メラシール 100+」スタンドDXタイプは、受注発注製品のため、ご注文いただいた日から納品まで約2ヶ月かかります。

MELAG
competence in hygiene

MELAG(メラグ社)について、詳しく確認されたい方はコチラ→
<https://www.melag.com/ja>



※掲載の情報は2020年6月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東 (03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286