

バイト材は両側で噛む

片側の印象模型でも、バイト材を両側で噛まないで咬合偏位を起こし正確な咬合位置が再現できない。

両側でバイト材を噛ませると咬合の偏位が起きづらい



バイトワックスが噛み切れているか確認

バイトワックスを十分に軟化していないと正確なバイトが採れない。



口腔内で接触している部位のワックスが抜けている。



口腔内のバイトが模型に再現されている。



口腔内で接触している部位のワックスが抜けていない。



口腔内よりもバイトが高くなっている。

シリコーンバイトは模型の変形が確認できる

正確に採ったシリコーンバイトは変形が極めて少ないので、適合が合わない場合は模型の変形を疑う。



フィットしていない

シリコーンバイトがフィットしていないので模型の変形が疑われる。