



患者さんの「噛めてます」って  
それホント??



# “咬合力や咀嚼能力” 見える化



## 有床義歯咀嚼機能検査

### 有床義歯咀嚼機能検査の目的

- ✓ 咀嚼機能の回復度を客観的に評価する
- ✓ 検査結果をもとに、義歯の調整や機能回復の取り組みに活かす
- ✓ 患者さんの「噛む機能」を数値化し、治療の効果を見える化する
- ✓ 咬合力や咀嚼能力の改善を確認し、食事指導や口腔機能管理につなげる



保険の算定は  
**1-0・2-0**  
どちらか一方!

新製有床義歯等の  
装着日より前に  
1回

新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して  
**6か月以内月1回が限度**



**1-0**

### 咀嚼能力測定のみ実施

保険点数: **140点**



関連製品

咀嚼能力検査装置

#### グルコセンサーGS-IIIN

グルコース分析装置 ジーシー グルコセンサー GS-IIIN  
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000311  
製造販売元 株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼町76番1号



最大 7回 980点



140点



140点



140点



140点

**2-0**

### 咬合圧測定のみ実施

保険点数: **130点**



関連製品

歯科用咬合力計

#### 口腔機能モニター Oramo2

歯科用咬合力計 口腔機能モニター Oramo2  
一般医療機器 特定保守管理医療機器 23B2X10022000007  
発売元 株式会社ジーシー 東京都文京区本郷3丁目2番14号  
製造販売元 住友理工株式会社 愛知県小牧市東三丁目1番地



or



or



or



or



130点



130点



130点



130点

装着前に実施した検査を装着後も行う

※ 1-0、2-0の同時算定不可

※ 厚生労働省HP「令和6年度診療報酬改定について」を参照

# 有床義歯咀嚼機能検査


施設基準の届出が必要です

## 【対象患者】

有床義歯咀嚼機能検査は、当該患者が次のいずれかに該当する場合に限り算定する。

- 新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に準ずる場合。
- 舌接触補助床を装着する場合。
- 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の(5)に準ずる場合。
- 有床義歯又は熱可塑性樹脂有床義歯を装着する患者であって、左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合(第三大臼歯は歯数に含めない。)
- 口蓋補綴、顎補綴を装着する場合。

左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している例

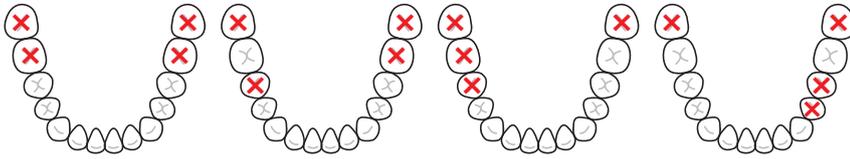

左右第二大臼歯  
両側欠損

&

他臼歯 2歯以上欠損  
(第三大臼歯は含めない)




注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咀嚼機能検査を行った場合に算定する。

- 2 有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。
- 3 新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算定する。
- 4 新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。
- 5 検査2については、検査1を算定した月は算定できない。

※厚生労働省HP「令和6年度診療報酬改定について」を参照

## 口腔機能低下症の検査にも！ 特長を動画で簡単チェック！

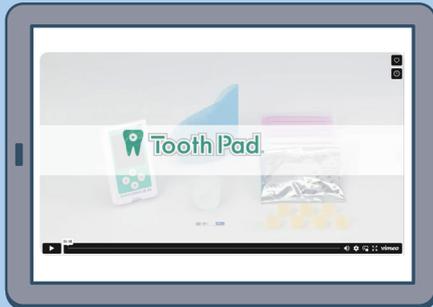

1分でわかるグルコセンサー GS-IIIN



グルコラムとグルコセンサーで  
手軽にグルコースの  
咀嚼能力が測れます

グルコセンサーの  
数値が100mg/dL未満の場合は  
咀嚼能力低下の可能性があり  
ます



**咀嚼能力検査 1** 保険点数: **140点**

3月に1回に限り算定可



1分でわかるOramo2



Oramo2は  
咬合力がその場で  
わかる!



**咬合圧検査 1**


3月に1回に限り算定可



1分でわかるバイトフォース/プレスケールII



厚さ1mm以下のプレスケールを  
3秒 噛んで計測します

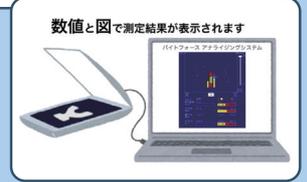

保険点数: **130点**

口腔機能情報サイト



口腔機能情報サイト

アクセスはこちら



カスタマーサービスセンター お客様窓口 ☎0120-416480 受付時間 9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く) <https://www.gc.dental/japan/>

支店 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333 営業所 ●北海道 (011)729-2130 ●東北 (022)785-8040 ●名古屋 (052)757-5722 ●九州 (092)441-1286

※掲載の内容は2026年2月現在のものです。