

## 【支台築造用レジン「ユニフィルコアEM」 (直接法) の歯面処理】

## 1 混和 (1-プライマー+DCA)



1-プライマーとG-プレミオボンドDCAを**1:1**で混和します。



1-プライマー G-プレミオボンドDCA

⚠ 各ステップの塗布に使用するアプリケーションは別々の物を使用してください。

## 2 塗布 (混和液)



混和した液を接着歯面に塗布し**10秒**放置します。

⚠ 各ステップの塗布に使用するアプリケーションは別々の物を使用してください。

## 3 強圧エア (乾燥)



バキュームで吸引しながら、**強圧エア**で充分に乾燥します。

## 4 光照射



歯科重合用光照射器で光照射します。

## G2-ボンド ユニバーサル 光照射時間

照射器	G-ライト プリマ II Plus (LED)	ハロゲン	キセノン
光照射時間	5秒 (F5モード)	10秒	5秒 (2ステップ照射)

## &lt;窩洞が深い場合の光照射時間&gt;

- ・G-ライト プリマ II Plus: 10秒 (10モード)
- ・ハロゲン: 20秒
- ・キセノン: 8秒 (2ステップ照射5秒+3秒)

## 5 支台築造

ユニフィルコアEMによる  
支台築造へ



ユニフィルコアEM