


歯質【CR「グレースフィルシリーズ」充填修復】

1 塗布 (1-プライマー)

1

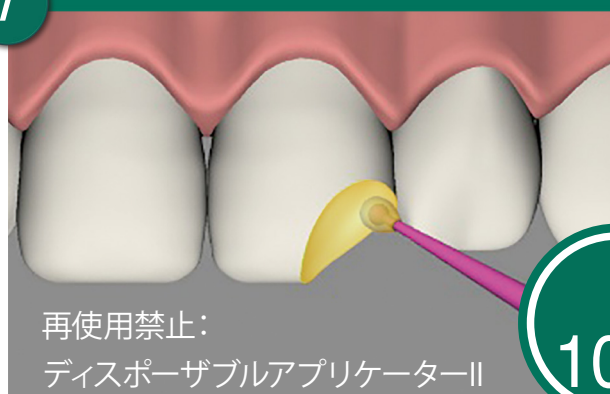

乾燥させた被着面に
1-プライマーを塗布し**10秒**
放置します。

再使用禁止：
ディスポーザブルアPLICエーターII

10秒



1-プライマー

⚠ 各ステップの塗布に使用するアPLICエーターは
別々の物を使用してください。

2 強圧エアー (乾燥)

2



バキュームで吸引しながら
強圧エアーで約**5秒間**乾燥
します。


5秒

再使用禁止：
ディスポーザブルアPLICエーターII

⚠ 各ステップの塗布に使用するアPLICエーターは
別々の物を使用してください。

3 塗布 (2-ボンド)

3

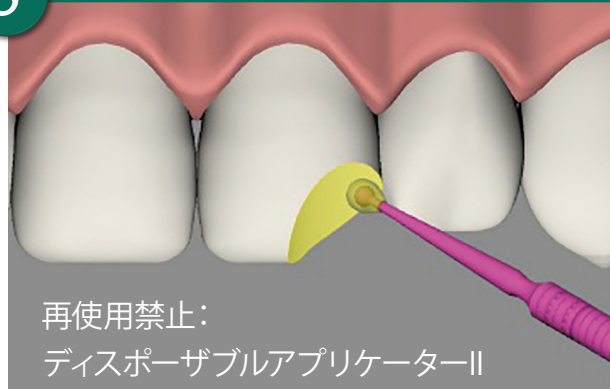


1-プライマー処理後の歯面
に**2-ボンド**を塗布します。



2-ボンド

4 弱圧エアー


4

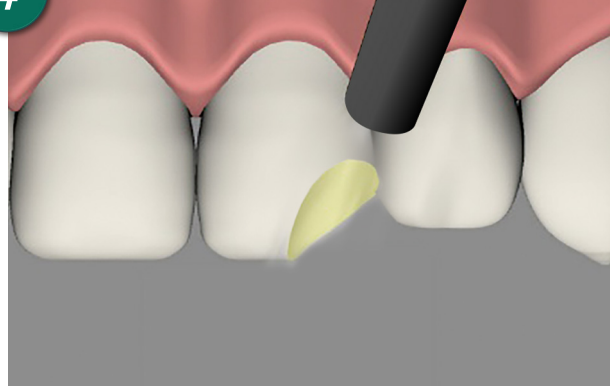

弱圧エアーで均一な層
にします。

5 光照射

5

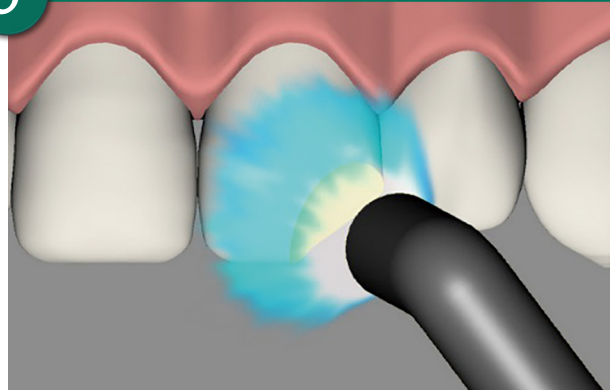

歯科重合用光照射器で
光照射します。

G2-ボンド ユニバーサル 光照射時間

照射器	G-ライト プリマ II Plus (LED)	ハロゲン	キセノン
光照射時間	5秒 (F5モード)	10秒	5秒 (2ステップ照射)

<窩洞が深い場合の光照射時間>

- ・G-ライト プリマ II Plus: 10秒 (10モード)
- ・ハロゲン: 20秒
- ・キセノン: 8秒 (2ステップ照射5秒+3秒)

6 CR充填

6

グレースフィルシリーズによる充填修復へ

