


## 歯質【CR「グレースフィルシリーズ」充填修復】

## 1 塗布 (1-プライマー)

1

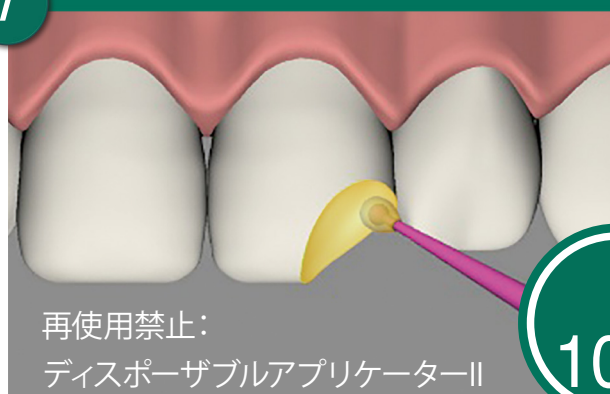

乾燥させた被着面に  
**1-プライマー**を塗布し**10秒**  
放置します。

再使用禁止：  
ディスポーザブルアプリーケーターII

**!** 各ステップの塗布に使用するアプリーケーターは  
別々の物を使用してください。



1-プライマー

2


## 強圧エアー (乾燥)



バキュームで吸引しながら  
**強圧エアー**で約**5秒間乾燥**  
します。

3

## 塗布 (2-ボンド)

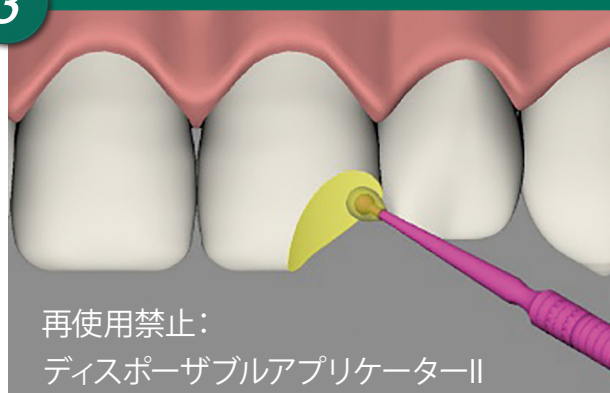

1-プライマー処理後の歯面  
に**2-ボンド**を塗布します。

再使用禁止：  
ディスポーザブルアプリーケーターII


**!** 各ステップの塗布に使用するアプリーケーターは  
別々の物を使用してください。



2-ボンド

4


## 弱圧エアー

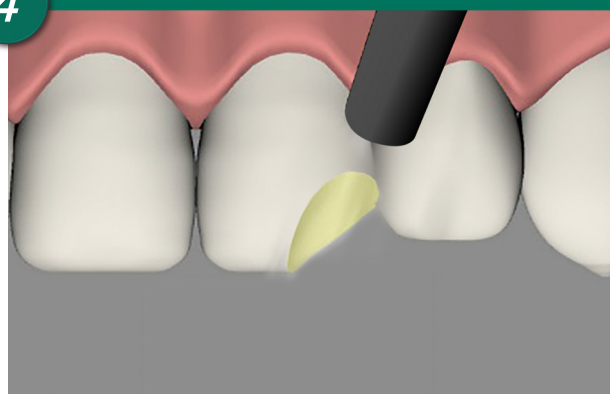

**弱圧エアー**で均一な層  
にします。

5

## 光照射

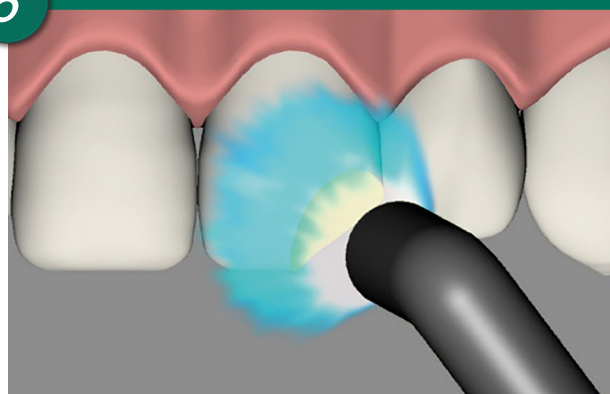

歯科重合用光照射器で  
光照射します。

## G2-ボンド ユニバーサル 光照射時間

照射器	G-ライト プリマ II Plus (LED)	ハロゲン	キセノン
光照射時間	5秒 (F5モード)	10秒	5秒 (2ステップ照射)

## &lt;窩洞が深い場合の光照射時間&gt;

- ・G-ライト プリマ II Plus: 10秒 (10モード)
- ・ハロゲン: 20秒
- ・キセノン: 8秒 (2ステップ照射5秒+3秒)

6

## CR充填

グレースフィルシリーズによる充填修復へ

