

## 【象牙質レジンコーティング】

## 1 塗布 (1-プライマー)



乾燥させた歯面に**1-プライマー**を塗布し**0秒～10秒**放置します。




1-プライマー

## 2 強圧エアー (乾燥)



バキュームで吸引しながら、**強圧エアー**で約**5秒間**乾燥します。

## 3 光照射

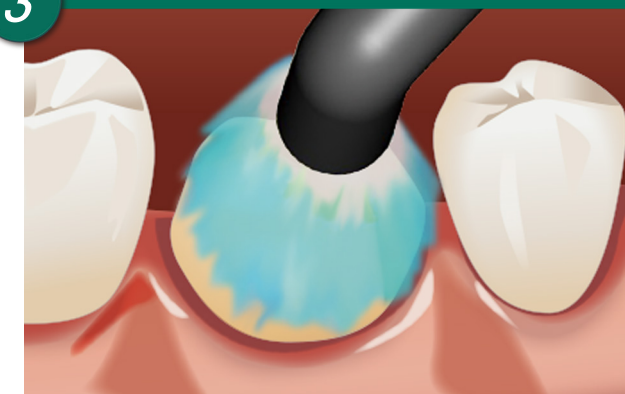

歯科重合用光照射器で光照射します。

## G2-ボンド ユニバーサル 光照射時間

照射器	G-ライト プリマ II Plus (LED)	ハロゲン	キセノン
光照射時間	5秒 (F5モード)	10秒	5秒 (2ステップ照射)

## &lt;窩洞が深い場合の光照射時間&gt;

- ・G-ライト プリマ II Plus: 10秒 (10モード)
- ・ハロゲン: 20秒
- ・キセノン: 8秒 (2ステップ照射5秒+3秒)

## 4 硬化後の未重合層の除去



硬化後、固く絞ったアルコール綿球などで拭いて、未重合層を除去します。



レジン系の仮封材を用いる場合、あらかじめワセリンをレジンコーティング面に塗布します。