

ルシェロ ホワイトシリーズ

フッ素入り歯面研磨ペースト・薬用歯みがき類

PTCペースト ルシェロホワイト
 ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア
 ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

プロフェッショナルケア × セルフケアで
 輝き続ける白い歯に




1ペースト・1ステップで簡単メンテナンス PTCペースト ルシェロホワイト



歯にやさしく美白ケア ルシェロ歯みがきペースト ホワイトシリーズ

効率よくステイン除去

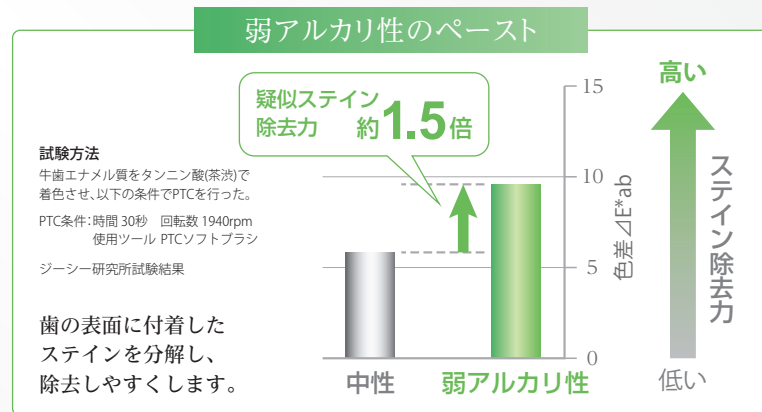

PTCペースト

歯面に密着するソフトペーストで狙ったところを効率よくクリーニング



洗い残しがわかりやすい
グリーンのペースト


グリーン
シトラス
フレーバー





このような患者さんに



歯よりも軟らかいLime粒子®

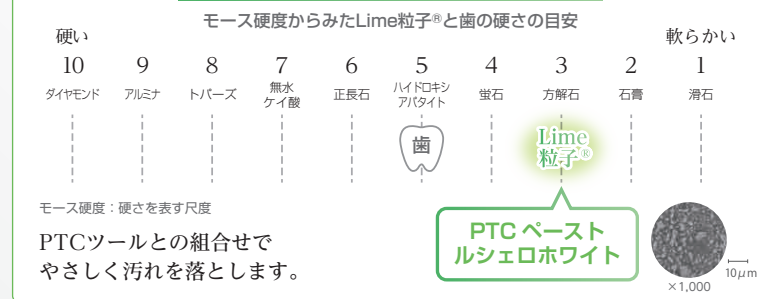

弱アルカリ性
ステインを
浮かせる

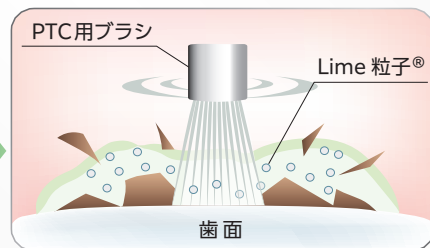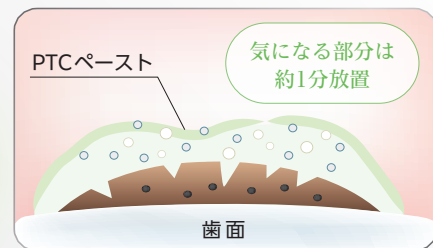

Lime粒子®
ステインを
剥ぎとる

※イメージ図



患者さんは紅茶を愛飲しており、歯面に着色があります。



PTC用ブラシとPTCペースト ルシェロホワイトで着色を除去します。



歯間部についた着色まで1ペースト・1ステップでしっかり除去できます。

NEW


ホワイトプレミアムケア

ホワイトニング前後の+αケアに
ホワイトニング前
知覚過敏症状防止
ペリクルケア
ホワイトニング後
知覚過敏症状対策
後戻り防止

薬用成分
乳酸アルミニウム

薬用成分
モノフルオロリン酸
ナトリウム1450ppmF

象牙細管を封鎖することで、知覚過敏症状を予防します。

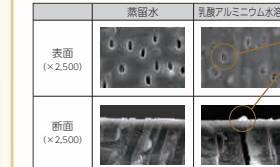

乳酸アルミニウムが象牙細管を封鎖することで歯がしみるのを防ぐ

試験条件
1. 牛歯歯冠部から象牙質を切り出し、酸処理にて象牙細管を開く。
2. 試験試料に象牙質を浸漬し、37℃で静置。
3. 象牙質を蒸留水で洗浄し、乾燥。
4. 象牙質表面・断面をSEMで観察。

日本ゼトック社試験結果

グリーン
シトラス
フレーバー

ホワイト



日々のステインのケアに

薬用成分
モノフルオロリン酸
ナトリウム950ppmF

ビュアミント
フレーバー



このような方におすすめ

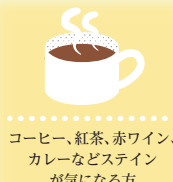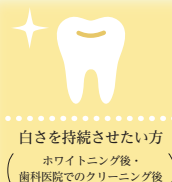

3つの力で歯を白く

弱アルカリ性
ステインを分解して
浮かせる

歯の表面に付着したステインを分解し、除去しやすくします。

Lime粒子®
ステインを
やさしく落とす


高濃度に配合した歯よりも軟らかくキメ細やかなLime粒子®(清掃剤)とブラッシングで、落としにくいステインをやさしく除去します。

PEG400
タバコのやにを
溶解除去

薬用成分の「ポリエチレングリコール(PEG)400」がタバコのやにを溶解除去します。

試験方法
1. ハイドロキシアパタイトをお茶・アルブミン・クエン酸鉄アンモニウムで染色
2. 各歯みがきペーストの希釈液を用い、機械でのブラッシングを実施

ジーシー研究所試験結果

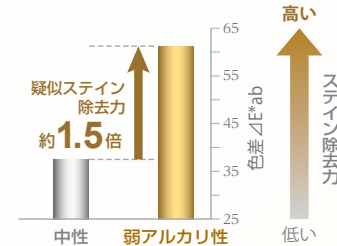

モース硬度からみたLime粒子®と歯の硬さの目安



ステイン: 着色汚れ



フッ素入り歯面研磨ペースト ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト

香味●グリーンシトラス
成分●炭酸カルシウム(Lime粒子®)、ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム、濃グリセリン、パラベン、黄色4号、青色1号、香料(グリーンシトラス)、その他
内容量●80g
包装●1歯:1本

△本品にはパラベンが含まれておりますので、パラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。

歯面研磨材 ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト
一般医療機器 13B2X00124000003




効果的な使い方



動画で確認


●術前の乾燥

・ペーストのpHを唾液等で低下させないようにエアで乾燥させる

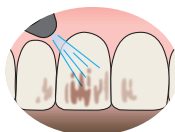

●塗布後約1分放置

・ステインが気になる部分からペーストをたっぷり塗布し、約1分放置する
・放置している間に他の部位からクリーニング

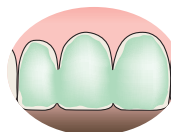

●器材の選択

・汚れの状態に合わせて使用器材を選択する



<PTC用ブラシ>
薄いステインが全体的に付着している場合



<PTC用カップ>
目立つステインがみられない場合

関連製品



歯面清掃用ブラシ ジーシー PTCブラシ

種類●1種=No.1
包装●1歯:20個

歯科予防治療用ブラシ ジーシー PTCブラシ
一般医療機器 13B1X00155000103
製造販売元 株式会社ジーシー
東京都板橋区蓮沼町76番1号



歯面清掃用カップ ジーシー PTCカップⅡ

種類●1種
包装●1歯:20個

歯磨きカップ ジーシー PTCカップⅡ
一般医療機器 13B1X00155000291
製造販売元 株式会社ジーシー
東京都板橋区蓮沼町76番1号



歯面清掃器材用アタッチメント ジーシー PTCマンドレル

包装●1歯:10本

歯科用マンドレル ジーシー PTCマンドレル
一般医療機器 13B1X00155000101
製造販売元 株式会社ジーシー
東京都板橋区蓮沼町76番1号



デンタルフロス ルシェロフロス(医院用)

種類●2種=アンソックス、ミントワックス
内容量●200m

ケース色●アンソックス1色=ホワイト
ミントワックス1色=ピンク

包装●1歯:1個
※30m仕様もございます



歯科医院用

薬用歯みがき類 医薬部外品

ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア

【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP

香味●グリーンシトラス
成分●[清掃剤]炭酸カルシウム(Lime粒子)[溶剤]精製水[湿潤剤]濃グリセリン[薬用成分]ポリエチレングリコール400、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素1450ppm)[甘味剤]キシリトール[pH調整剤]水酸化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム[粘度調整剤]カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース[香味剤]香料(グリーンシトラスタイプ)[保存剤]安息香酸ナトリウム[増粘剤]無水ケイ酸
内容量●100g
包装●1歯:1本

包装・希望患者価格●1歯:1本=¥2,200(税込)
※6歳未満の子供の手の届かないところに保管し、使用させない。

※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に黄色く見える場合がございますが、品質に問題はありません。



歯科医院用

薬用歯みがき類 医薬部外品

ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

香味●ビュアミント
成分●[清掃剤]炭酸カルシウム(Lime粒子)[溶剤]精製水[湿潤剤]濃グリセリン[薬用成分]ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)[甘味剤]キシリトール[粘度調整剤]カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース[香味剤]香料(ビュアミントタイプ)[pH調整剤]リン酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム[増粘剤]無水ケイ酸[保存剤]パラベン
内容量●100g
包装●1歯:1本

包装・希望患者価格●1歯:1本=¥1,980(税込)

△本品にはパラベンが含まれておりますので、パラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。

関連製品



歯ブラシ ジーシー ルシェロ 歯ブラシ

B-10/B-20・21ピセラ/W-10

毛の硬さ●B-10、B-20・21=M(ふつう)、S(やわらかめ)
W-10=やわらかめ

包装●B-10 1歯:20本
B-20・21 1歯:20本
W-10 1歯:6本(各色3本)

包装・希望患者価格●B-10 1本=¥390(税込)
B-20・21 1本=¥340(税込)
W-10 1本=¥450(税込)




効果的な使い方




動画で確認

●歯ブラシの選び方

・ラウンド毛(ルシェロ歯ブラシB-10/B-20・21ピセラ)、ひし形毛(ルシェロ歯ブラシW-10)がおすすめ

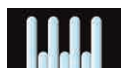

ラウンド毛

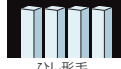

ひし形毛



●ブラッシング前

・歯ブラシを濡らさない
・ペーストを歯ブラシ全体にたっぷりのせる(約1g)



●ブラッシング時

・ステインが気になる部分から磨き始める
・力を入れすぎず、軽い力で磨く

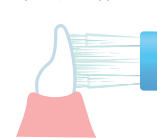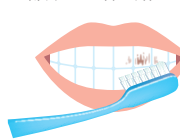

※掲載情報と価格は、2025年9月現在のものです。
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

